




CREATE IT.

ALMANACH KOŃCÓWEK

DO ULTRADŹWIĘKOWYCH SKALERÓW VARIOS




Skalery ultradźwiękowe Varios 2, Varios

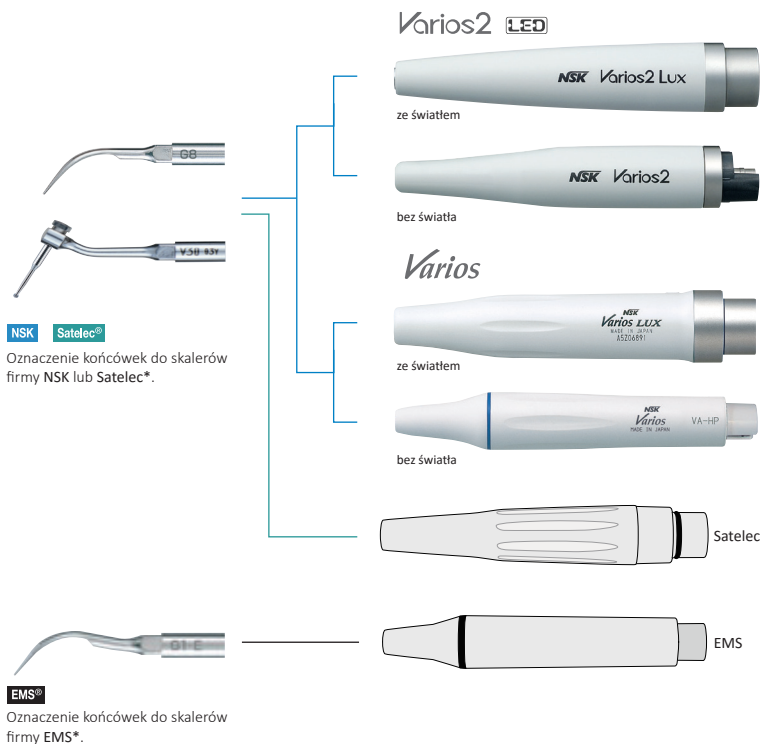

Satelec® *Satelec znak towarowy zastrzeżony przez francuską firmę Acteon SA.

EMS® *EMS znak towarowy zastrzeżony przez szwajcarską firmę Electro Medical Systems SA.

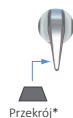

* W celu dokładniejszego pokazania przekroju końcówek, ich rysunki są czterokrotnie większe od wymiaru rzeczywistego.

ZASADY POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA SKALERA ULTRADŹWÍKOWEGO

1 USTAWIENIE KOŃCÓWKI W STOSUNKU DO ZĘBA.


Efektywna moc pracy skalera zależy od doboru punktu styku końcówki z powierzchnią zęba. Najlepszy efekt osiąga się, gdy płaszczyzna styku powierzchni końcówki znajduje się w odległości 2-3 mm od czubka końcówki (Rys.1).



Rys.1

2 USTAWIENIE KOŃCÓWKI POD PRAWIDŁOWYM KĄTEM


Dokładając końcówkę do powierzchni zęba pod kątem 15° lub mniejszym uzyskujemy najlepszą kontrolę mocy, nie wzbudzając uczucia dyskomfortu pacjenta (Rys.2).

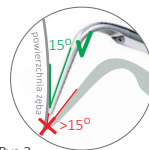

Rys.2

3 SIŁA DOCISKU

Siła docisku końcówki do zęba powinna mieć się w definicji „muśnięcia piórkiem”. Końcówka skalera w czasie kontaktu z powierzchnią zęba powinna być w ciągłym ruchu, aby wykorzystać pełną efektywność jej działania oraz uniknąć nieporządkanych uszkodzeń zęba (Rys.3).

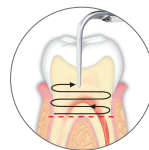

Rys.3


4 TRYB I ZAKRES MOCY

Po wybraniu właściwego trybu mocy, zalecamy rozpocząć zabieg z ustawioną najniższą mocą pracy skalera i w zależności od zaobserwowanego efektu stopniowo jej zwiększanie (patrz uwaga poniżej).

! Dostępne są trzy tryby mocy: G, E, P.

Przed przystąpieniem do pracy korzystając z dołączonej na osobnej karcie tabeli upewnij się czy używasz końcówki w prawidłowym i właściwie ustawionym trybie mocy.

Przeznaczenie końcówek

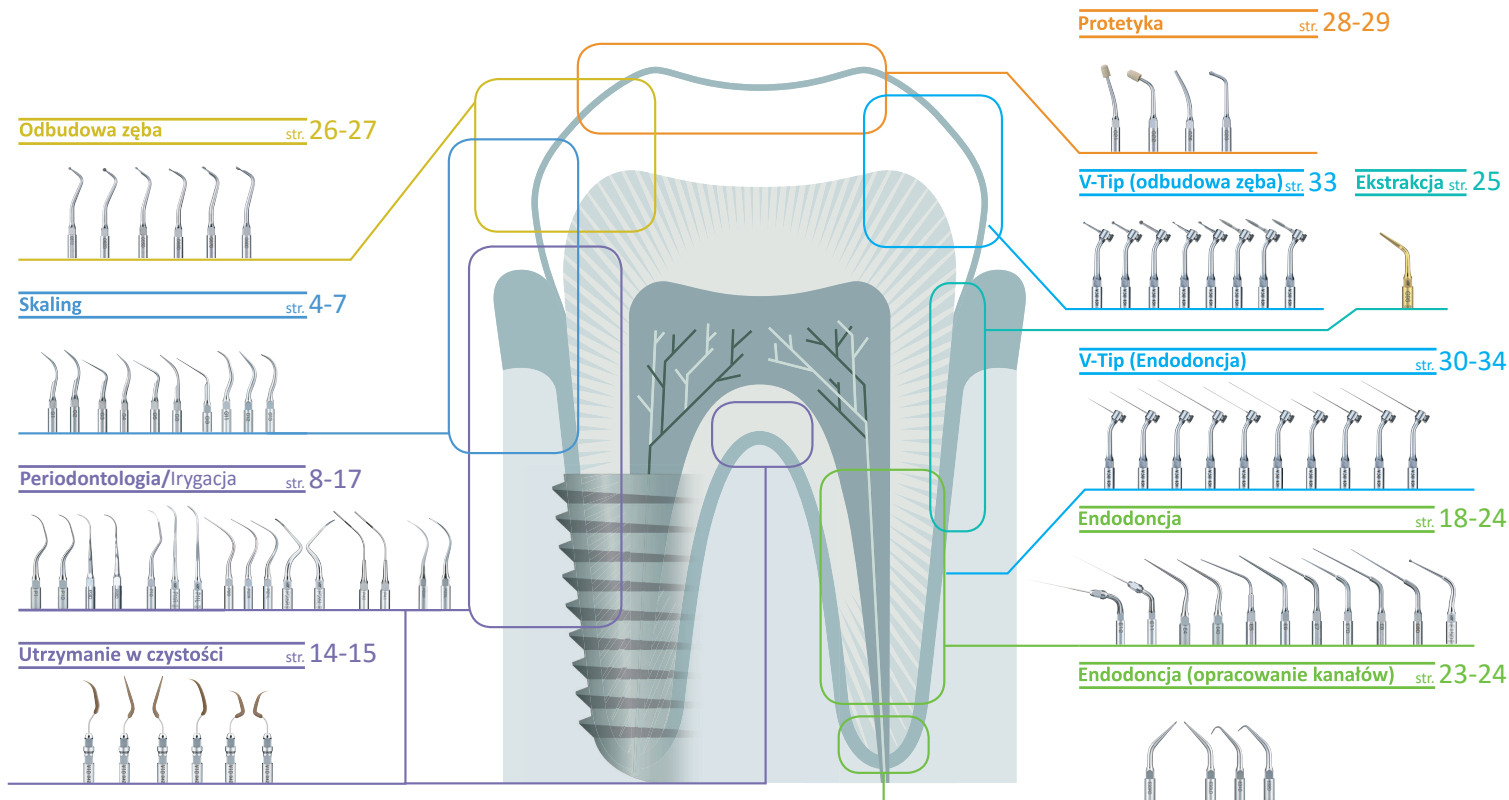

można sterylizować termodezynfekcyjnie



można sterylizować w temp. do 135°C



Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji prezentowanych produktów.

SKALING

MODEL **G1**

- Końcówki do leczenia początkowych stadiów paradontozy.
- Do usuwania kamienia naddziąsłowego, międzyzębowego oraz kamienia przy szyjce zęba.



NSK Satelec® MODEL **G1**

KOD **Z217101**

EMS® MODEL **G1-E**

KOD **Z291101**



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **G2**

- Końcówki do leczenia początkowych stadiów paradontozy.
- Do usuwania kamienia naddziąsłowego i osadu z nikotyny.



NSK Satelec® MODEL **G2**

KOD **Z217102**

EMS® MODEL **G2-E**


KOD **Z291102**



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **G3**

- Końcówki do leczenia początkowych stadiów paradontozy.
- Do usuwania kamienia naddziąsłowego i osadu z nikotyny.

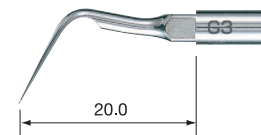

NSK Satelec® MODEL **G3**


KOD **Z217103**

EMS® MODEL **G3-E**

KOD **Z291103**



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

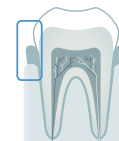

MODEL **G4**

- Usuwają kamień naddziąstkowy, międzyzębowy oraz duże i średnie osady z nikotyny.



Przekrój

NSK Satelec® MODEL **G4**

KOD **Z217104**

EMS® MODEL **G4-E**



KOD **Z291104**



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **G5**

- Usuwają kamień naddziąstkowy, międzyzębowy duże i średnie osady z nikotyny oraz naturalny biofilm osadzający się na zębach.

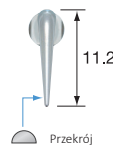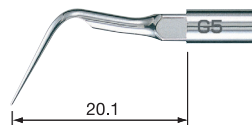

Przekrój

NSK Satelec® MODEL **G5**


KOD **Z217105**



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **G6**

- Usuwają kamień naddziąstkowy, międzyzębowy duże i średnie osady z nikotyny oraz naturalny biofilm osadzający się na zębach.

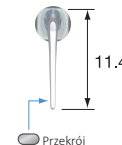

Przekrój

NSK Satelec® MODEL **G6**

KOD **Z217106**

EMS® MODEL **G6-E**

KOD **Z291106**




Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

SKALING

MODEL **G8**

- Do usuwania:
- kamienia naddziąsłowego
- kamienia z wąskich szczelin międzyzębowych
- kamienia z dziąsła brzęznego

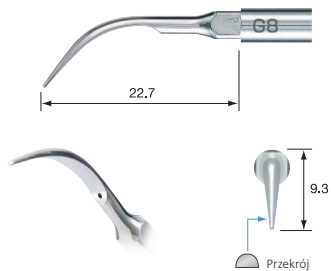

NSK Satelec® MODEL **G8**


KOD **Z217108**



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **G9**

- Do usuwania:
- kamienia naddziąsłowego
- kamienia z wąskich szczelin międzyzębowych
- kamienia z dziąsła brzęznego
- biofilmu spod naturalnego zęba

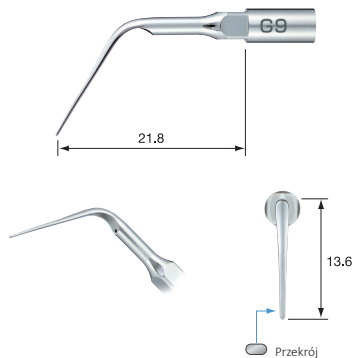

NSK Satelec® MODEL **G9**


KOD **Z217109**



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **G11**

- Do usuwania kamienia naddziąsłowego

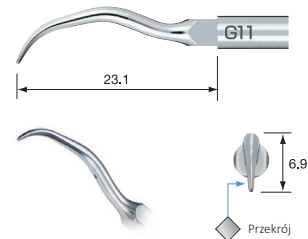


NSK Satelec® MODEL **G11**

KOD **Z217411**




Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

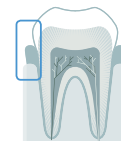

MODEL **G12**

- Do usuwania kamienia naddziąsłowego

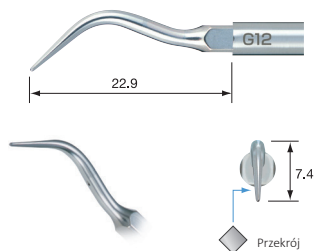

NSK Satelec® MODEL **G12**


KOD **Z217412**



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **G13**

- Do usuwania kamienia naddziąsłowego
z szyjki i przestrzeni międzyczębowych

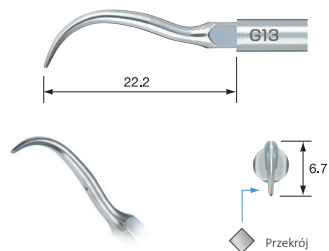

NSK Satelec® MODEL **G13**

KOD **Z217413**




Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

PERIODONTOLOGIA

MODEL **P1**

- Do usuwania:
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyczębowych
- biofilmu przydziąsłowego

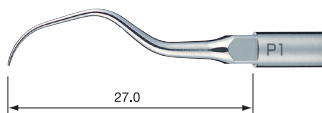


NSK Satelec® MODEL **P1**

KOD **Z217404**

MODEL **P1D**

- Do usuwania:
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyczębowych
- kamienia z głębokich kieszonek
- Do oczyszczania jamy ropnia
- Do wygładzania wewnętrznej ściany kieszonki

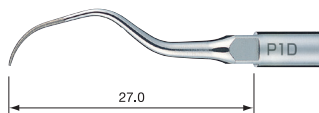


NSK Satelec® MODEL **P1D**

KOD **Z217405**

• Końcówka pokryta diamentem




P1 - do zębów jednokorzeniowych
P1D - do zębów wielokorzeniowych

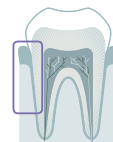

MODEL **P2D**

- Do usuwania • kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych • kamienia z głębokich kieszonek
- Do oczyszczania furkacji i jamy ropnia • Do wygładzania wewnętrznej ściany kieszonki

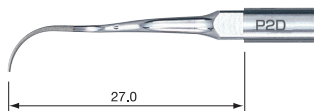

Przekrój



NSK Satelec® MODEL **P2D**


KOD **Z217402**

- Końcówka pokryta diamentowym pyłem
- Końcówka prawoskrętna



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **P3D**

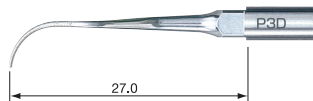

Przekrój



NSK Satelec® MODEL **P3D**

KOD **Z217403**

- Końcówka pokryta diamentem
- Końcówka lewoskrętna



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych



P2D / P3D



PERIODONTOLOGIA

MODEL **P10**

- Do usuwania:
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych
- kamienia z głębokich kieszonek
- Do oczyszczania jamy ropnia
- Do wygładzania wewnętrznej ściany kieszonki

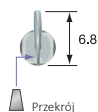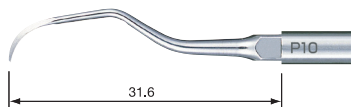

NSK Satelec® MODEL **P10**

KOD **Z217410**

- Końcówka prosta o ostrej krawędzi



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **P11R**

- Do usuwania • kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych • biofilmu przydziąsłowego i obszaru furkacji
- Do oczyszczania furkacji



NSK Satelec® MODEL **P11R**


KOD **Z217408**

- Końcówka prawostronna, o ostrej krawędzi



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **P11L**

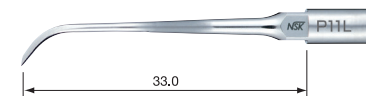


NSK Satelec® MODEL **P11L**

KOD **Z217409**

- Końcówka lewostronna, o ostrej krawędzi




Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

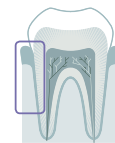

MODEL **P20**

- Do usuwania biofilmu przydziąstowego.

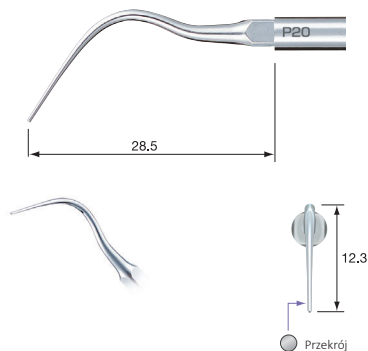

NSK Satelec® MODEL **P20**

KOD **Z217420**

EMS® MODEL **P20-E**

KOD **Z291420**


- Końcówka prosta



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **P21R**

- Do usuwania biofilmu przydziąstowego.

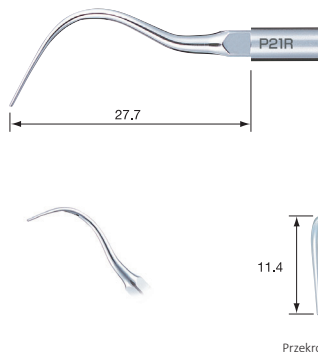

NSK Satelec® MODEL **P21R**

KOD **Z217422**

EMS® MODEL **P21R-E**

KOD **Z291422**


- Końcówka prawostronna



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **P21L**

- Do usuwania biofilmu przydziąstowego.

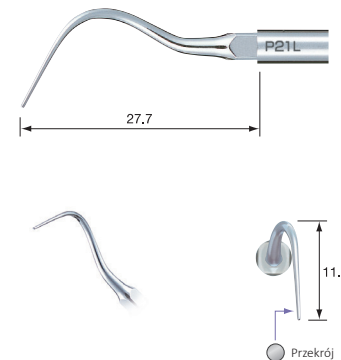

NSK Satelec® MODEL **P21L**

KOD **Z217421**

EMS® MODEL **P21L-E**

KOD **Z291421**

- Końcówka lewostronna






Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

PERIODONTOLOGIA

MODEL **P25R**

MODEL **P25L**

- Do usuwania biofilmu przydziąsłowego
- Do usuwania biofilmu z obszaru furkacji

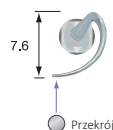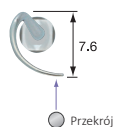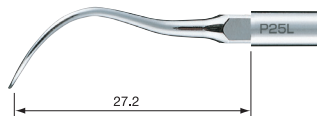

NSK Satelec® MODEL **P25R**

KOD **Z217424**

EMS® MODEL **P25R-E**

KOD **Z291424**

- Końcówka prawostronna



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

NSK Satelec® MODEL **P25L**

KOD **Z217425**

EMS® MODEL **P25L-E**


KOD **Z291425**


- Końcówka lewostronna



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych


P11R / P11L / P21R / P20 / P21L

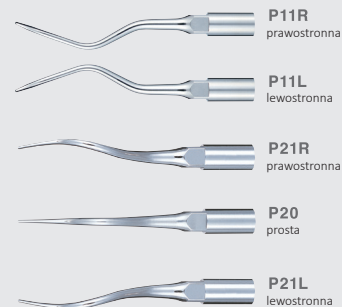

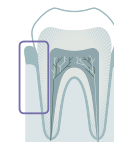

MODEL **P26R**

- Do usuwania • kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych • kamienia z głębokich kieszonek
- biofilmu przydziąsłowego • biofilmu z obszaru furkacji.

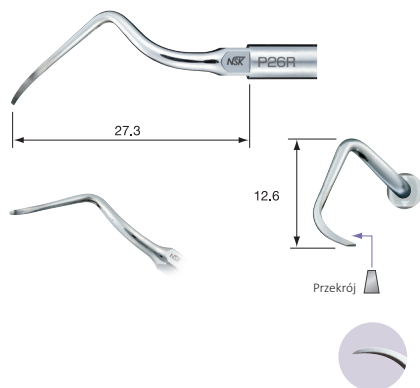

NSK Satelec® MODEL **P26R**


KOD **Z217426**

- Końcówka prawostronna, o ostrej krawędzi



Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

MODEL **P26L**

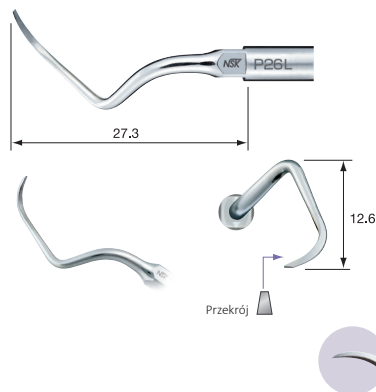

NSK Satelec® MODEL **P26L**


KOD **Z217427**

- Końcówka lewostronna, o ostrej krawędzi




Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych


P25R / P25L / P26R / P26L

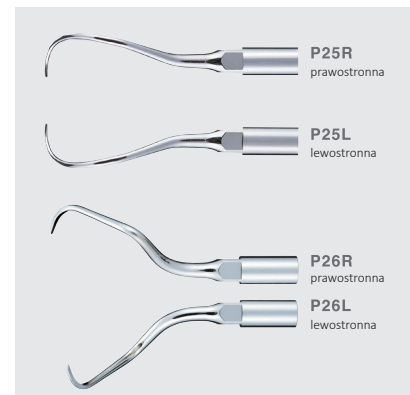

PERIODONTOLOGIA (UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI)

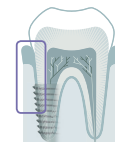


MODEL V10

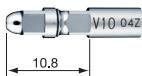

MODEL V-P10

- Do utrzymania w czystości protez i implantów.
- Końcówki wykonane ze specjalnego tworzywa. Dokładnie czyszczą nie uszkadzając implantów oraz części metalowych.

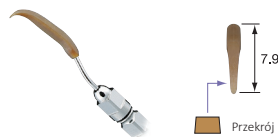

MODEL V-P11R

- Końcówki V-P11R/L prawe i lewe są dłuższe i zakrzywione w dwóch miejscach, łatwo docierają do trudno dostępnych obszarów, unikając kontaktu z sąsiadującymi zębami i konturami. Ich kształt zaprojektowano tak, aby jak najlepiej pasował do zębów o różnej morfologii. dzięki czemu są wszechstronnymi końcówkami do szerokiego zastosowania, począwszy od zębów przednich aż po przedtrzonowe.



MODEL V-P11L



NSK Satelec®

MODEL V10

KOD Z217041

- Uchwyt do mocowania końcówek typu V-Tip.
- Zestaw nie zawiera końcówek.

MODEL V-P10

KOD Y900184

- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10



MODEL V-P11R

KOD Y1002165

- Końcówka prawostronna
- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10




MODEL V-P11L

KOD Y1002166


- Końcówka lewostronna
- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10

PERIODONTOLOGIA (UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI)

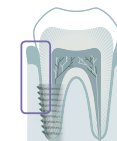

MODEL **V-P12**

- V-P12 dłuższa wersja popularnej końcówki skalera V-P10. Przeznaczona do konserwacji implantów i innych uzupełnień protetycznych.
- Jej kształt zapewnia łatwy dostęp do wszystkich obszarów poddawanych leczeniu.

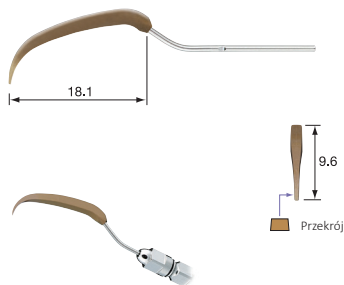

MODEL **V-P12**


KOD **Y1002167**

- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10



MODEL **V-P26R**

- Końcówki skalera V-P26R/L zakrzywione są w dwóch miejscach. Szerokie kąty zapewniają dostęp do obszarów niedostępnych dla końcówek skalera V-P11R/L lub dla innych tradycyjnych instrumentów. Przeznaczone do leczenia dalszych powierzchni zębów trzonowych i obszarów zatrzonowych, ponieważ czubek końcówki bardzo dokładnie dopasowuje się do morfologicznego kształtu zęba.

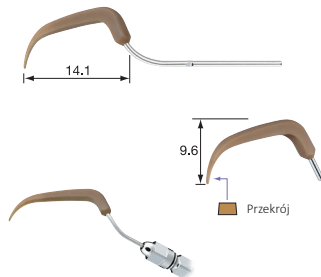


MODEL **V-P26R**

KOD **Y1002168**

- Końcówka prawostronna
- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10



MODEL **V-P26L**

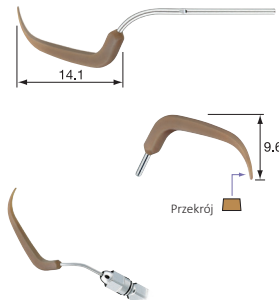

MODEL **V-P26L**

KOD **Y1002169**

- Końcówka lewostronna
- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10

Starter Kit



NSK Satelec®

MODEL

Perio-Control Tips Starter Kit

KOD **Y1002606**

- Zestaw podstawowy (bazowy):
- Uchwyt V10
- Klucz do mocowania końcówek typu E
- V-P11R, V-P11L, V-P26R, V-P26L (po 1 szt. z każdej)



PERIODONTOLOGIA (IRYGACJA I CZYSZCZENIE)

Końcówki do skutecznego czyszczenia po opracowaniu skalingu. Nie działają jak skaling.

MODEL **P40**

MODEL **P41**

• Bezpieczne w zastosowaniu niezależnie od wielkości kieszonek dzięki oznaczeniu wartości od 3 mm do 6 mm

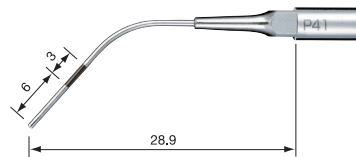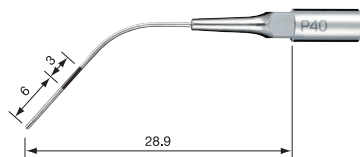

NSK Satelec® MODEL **P40**


KOD **Z217550**

• Średnica końcówki skalera $\varnothing$ 0,6 mm


NSK Satelec® MODEL **P41**

KOD **Z217555**

• Średnica końcówki skalera $\varnothing$ 0,8 mm

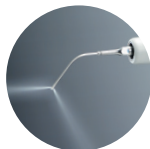

- Irygacja dwupunktowa
- Skutecznie czyści niezależnie od kąta wprowadzenia
- Zaokrąglony wierzchołek dla bezpieczeństwa przyzębia

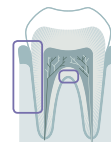

MODEL **Perio Kit A**



NSK Satelec®

MODEL **Perio Kit A**

Y900144

- Zestaw podstawowy Typ A
- P1D, P2D, P3D, P10 (po 1 szt. z każdej)
- Uchwyt

MODEL **Perio Kit B**



NSK Satelec®

MODEL **Perio Kit B**

Y900145


- Zestaw podstawowy Typ B
- P20, P25R, P25L, (po 1 szt. z każdej)
- Uchwyt

ENDODONCJA

Pilniki i końcówki do zbiegów poszerzania kanału korzeniowego, przepłukiwania i wykonywania wypełnień.

MODEL E4

- Do czyszczenia kanałów korzeniowych.
- Do usuwania cząstek i drobin tkanki korzeniowej oraz materiałów obcych.

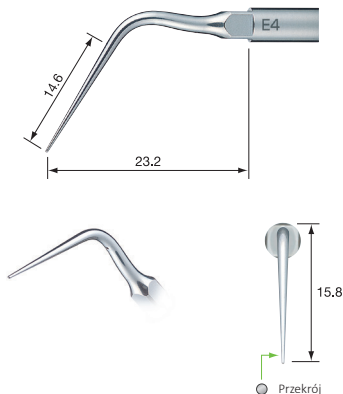

NSK Satelec® MODEL E4

KOD Z217428

- Średnica czubka końcówki ϕ 0,6 mm

MODEL E7

- Do czyszczenia kanałowego i usuwania części obcych.



NSK Satelec® MODEL E7

KOD Z217307

- Nie wymaga stosowania wody.

MODEL E8


- Do czyszczenia kanałowego i usuwania części obcych.




NSK Satelec® MODEL E8

KOD Z217308


- Nie wymaga stosowania wody.

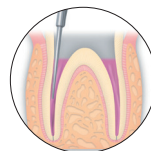

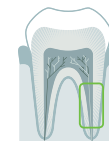

MODEL E4D

- Do czyszczenia oraz powiększania kanału zębowego.

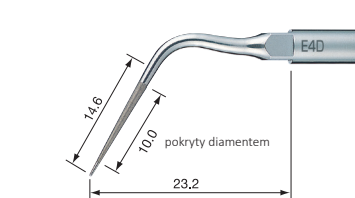

- Pokryty diamentem, z wyjątkiem odcinka 1mm na samym zakończeniu, redukuje to stopień podrażnienia kanału w jego dolnej części.


NSK Satelec® MODEL E4D

KOD Z217528

- Pokryte diamentem

MODEL E7D

- Do powiększania kanału zębowego.

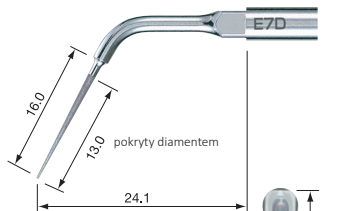



NSK Satelec® MODEL E7D

KOD Z217317

- Pokryte diamentem

MODEL E8D


- Do powiększania kanału zębowego.

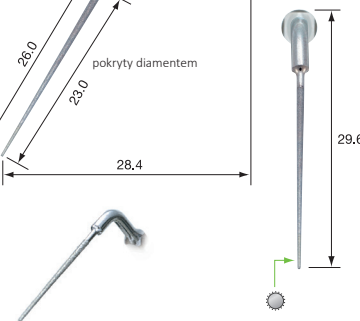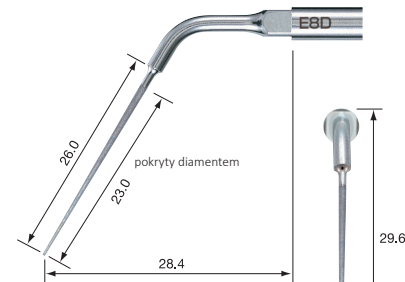

NSK Satelec® MODEL E8D

KOD Z217318


- Pokryte diamentem

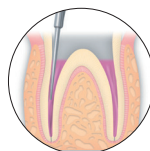

ENDODONCJA

MODEL E5


- Do kondensacji bocznej.

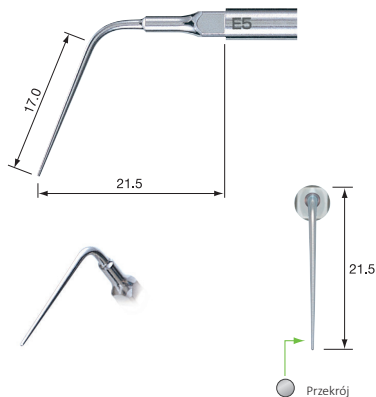

NSK Satelec® MODEL E5


KOD Z217305

- Nie wymaga stosowania wody.

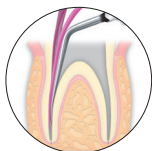

MODEL E6


- Do kondensacji bocznej.

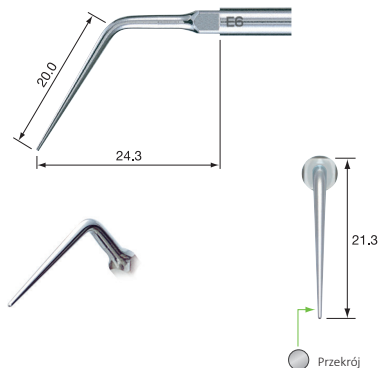

NSK Satelec® MODEL E6

KOD Z217306

- Nie wymaga stosowania wody.

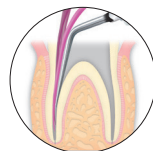

MODEL E15D


- Do lokalizacji kanałów korzeniowych i usuwania obliteracji.




NSK Satelec® MODEL E15D

KOD Z217319


- Zakończenie pokryte diamentem

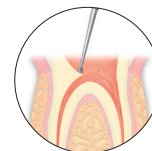

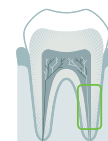

MODEL E11

- 120° - uchwyt kątowy do pilników typu U

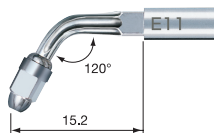


- Średnica trzonu $\varnothing$ 0,8mm)
- Do czyszczenia kanałów korzeniowych
- Do zębów przednich
- Zawiera klucz do wymiany pilników

NSK Satelec® MODEL E11

KOD Z217031

MODEL E12

- 95° - uchwyt kątowy do pilników typu U

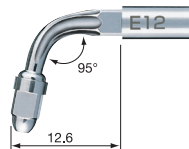

- Średnica trzonu $\varnothing$ 0,8mm)
- Do czyszczenia kanałów korzeniowych
- Do zębów tylnych
- Zawiera klucz do wymiany pilników


NSK Satelec® MODEL E12

KOD Z217032



W uchwycie kątowym typu U, zawsze należy stosować pilniki o długości podanej w poniższej tabeli. Stosowanie pilników o innych długościach może spowodować złamanie pilnika w trakcie wykonywania zabiegu.

		#15	#20	#25	#30	#35
E11	Varios2	22 mm	24.5 mm	22 mm	22 mm	22 mm
	Varios	22-23 mm	22-23 mm	23-25 mm	23-25 mm	24-26 mm
E12	Varios2	22 mm	24.5 mm	24.5 mm	24.5 mm	22 mm
	Varios	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm

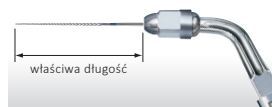

MODEL U Files

- Wymienne pilniki typu U

Długość: 33 mm. Trzon $\varnothing$ 0,8 mm

MODEL Ufiles 33 mm / #15

KOD
Y900062

MODEL Ufiles 33 mm / #20

KOD
Y900063

MODEL Ufiles 33 mm / #25

KOD
Y900064

MODEL Ufiles 33 mm / #30


KOD
Y900065

MODEL Ufiles 33 mm / #35

KOD
Y900066


- Poszczególne typy pilników pakowane są po 6 szt.

ENDODONCJA

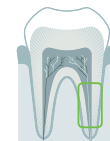

MODEL **Endo Kit E11**

- Do zębów przednich

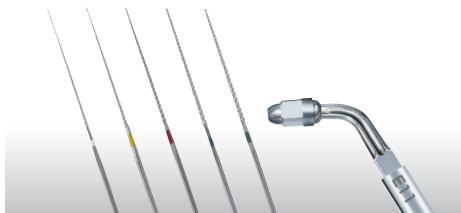

NSK Satelec®


MODEL **Endo Kit E11**

KOD **Y900146**

- 120° - uchwyt kątowy do pilników typu U
- Pilniki o długość 33 mm: #15, #20, #25, #30, #35, pakowane po 6 szt.
- Klucz do wymiany pilników

MODEL **Endo Kit E12**

- Do zębów tylnych

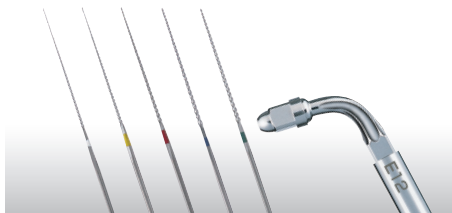


NSK Satelec®

MODEL **Endo Kit E12**

KOD **Y900147**


- 95° - uchwyt kątowy do pilników typu U
- Pilniki o długość 33 mm: #15, #20, #25, #30, #35, pakowane po 6 szt.
- Klucz do wymiany pilników

ENDODONCJA (WSTECZNE OPRACOWANIE KANAŁU)

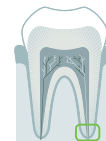

MODEL **E30RD**

- Do stosowania na zębach tylnych

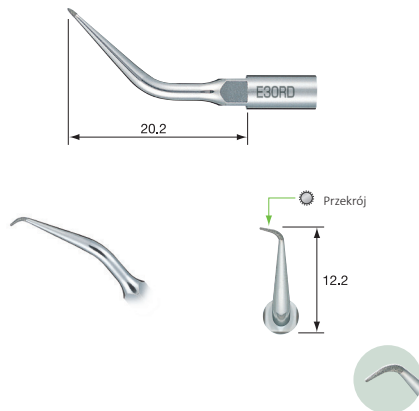


NSK Satelec® MODEL **E30RD**

KOD **Z217212**

- Zakończenie pokryte diamentem
- Prawoskrętna

MODEL **E30LD**

- Do stosowania na zębach tylnych

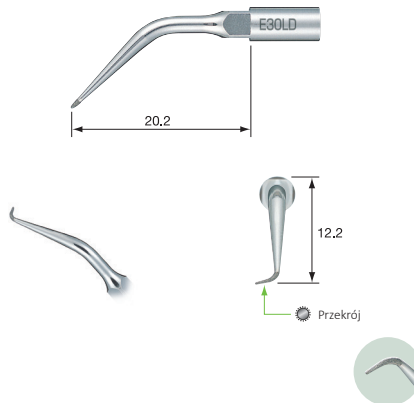

NSK Satelec® MODEL **E30LD**


KOD **Z217213**

- Zakończenie pokryte diamentem
- Lewoskrętna

- Mikroskopijnej wielkości zakończenie końcówki pokryte diamentem, skutecznie usuwa zębinę zlokalizowaną w okolicy wierzchołkowej.
- Dostępne są dwa rodzaje kątowych końcówek skalera (90°, 70°) do zębów przednich oraz dwa rodzaje zakrzywionych końcówek skalera (prawo, lewo) do zębów trzonowych.





ENDODONCJA (WSTECZNE OPRACOWANIE KANAŁU)

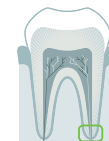

MODEL **E31D**

- Do stosowania na zębach przednich i tylnych
- Kąt nachylenia 70°

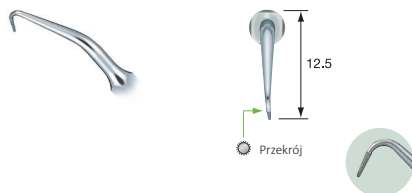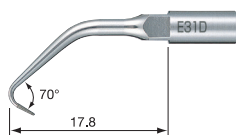



NSK Satelec® MODEL **E31D**

KOD **Z217210**

- Zakończenie pokryte diamentem
- Prawoskrętna

MODEL **E32D**

- Do stosowania na zębach przednich
- Kąt nachylenia 90°

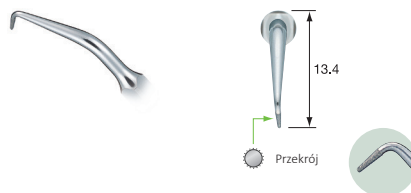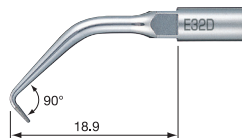

NSK Satelec® MODEL **E32D**

KOD **Z217211**

- Zakończenie pokryte diamentem
- Lewoskrętna

MODEL **Retro Kit**

- Zestaw podstawowy



NSK Satelec®


MODEL **Retro Kit**

KOD **Y900149**

- E30RD, E30LD, E31D, E32D
- Klucz: 1 szt.



EKSTRAKCJA

Końcówka do usuwania błony przyzębnej.

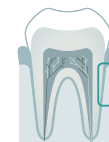


MODEL **G95**

- Końcówka z bezpiecznie zakończoną powierzchnią tnącą do usuwania próchnicy z powierzchni stycznych w przednich zębach.

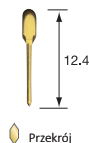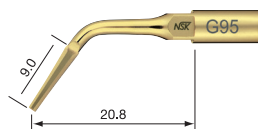


Porusza się w kierunkach bliżso-dalszym, przedśionkowo-językowym, oraz w górę i w dół, dostarczając wodę w kierunku dowerzchołkowym (pompowanie). W trakcie tego ruchu zwróć szczególną uwagę na przepływ płynu irygacyjnego. Aby zapobiec uszkodzeniu kości zębdolowej przesunij wierzchołek końcówki wzdłuż krawędzi długiej osi zęba.

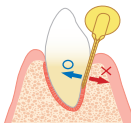

Ekstrakcja zęba jest możliwa bez nadmiernego usuwania kości zębdolowej (wewnętrznozębodolowej) wokół odlamanego korzenia, z zachowaniem morfologicznego kształtu zębdolowej.


- Zastosowanie irygacji poprawia wydajność.
- W przypadku stosowania systemu irygacji Varios 970.
- **G95** można stosować w urządzeniu ultradźwiękowym NSK.

NSK MODEL **G95**

KOD **Z217705**

- Pokryta tytanem (TiN) • Grubość 0,7mm • Podwójna krawędź, ostra w trzech płaszczyznach

Ekstrakcja korzeni (usuwanie górnej lewej dwójki)

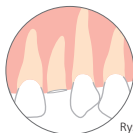

Rysunek poglądowy

Ząb zatrzymany (usuwanie dolnej lewej ósemki)



Uwaga, nie stosuj nadmiernej siły, tak jak w przypadku zastosowania dźwigni.

Rysunek poglądowy

ODBUDOWA ZĘBA (PRACE ODTWÓRCZE)

MODEL **G61D**

- Do usuwania próchnicy i opracowania powierzchni zęba.



NSK Satelec® MODEL **G61D**

KOD **Z217601**

- Zakończenie pokryte diamentem



MODEL **G62D**

- Usuwanie próchnicy z powierzchni stycznych.
- Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala na usunięcie zdrowych tkanek zęba.




NSK Satelec® MODEL **G62D**

KOD **Z217602**

- Zakończenie pokryte diamentem

MODEL **G65D**

- Usuwanie próchnicy z powierzchni stycznych.
- Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala na usunięcie zdrowych tkanek zęba.

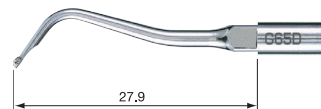

SK Satelec® MODEL **G65D**

KOD **Z217605**

- Zakończenie pokryte diamentem





MODEL **G66D**

- Usuwanie próchnicy z powierzchni przednich.
- Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala na usunięcie zdrowych tkanek zęba.




MODEL **G67D**

- Usuwanie próchnicy z powierzchni stycznych.
- Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala na usunięcie zdrowych tkanek zęba.



MODEL **G68D**

- Usuwanie próchnicy z powierzchni przednich.
- Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala na usunięcie zdrowych tkanek zęba.

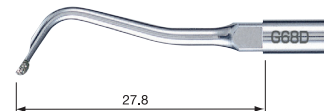

NSK Satelec® MODEL **G66D**

KOD **Z217606**

- Zakończenie pokryte diamentem



NSK Satelec® MODEL **G67D**

KOD **Z217607**


- Zakończenie pokryte diamentem



NSK Satelec® MODEL **G68D**

KOD **Z217608**

- Zakończenie pokryte diamentem

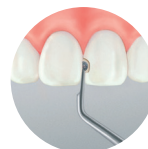

PROTETYKA (KONDENSACJA / USUWANIE / UPYCHANIE)

Do usuwania protez, kondensacji amalgamatu. Można stosować do skalingu, periodontologii i endodoncji.




MODEL **G21**

- Do zębów przednich
- Do cementowania małych protez, np. wkładu na zęby przednie.



MODEL **G22**

- Do zębów tylnych.
- Do cementowania dużych protez, np. nakładu lub korony na zęby trzonowe.

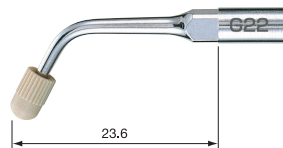

NSK Satelec® MODEL **G21**

KOD **Z217010**

- 3 wymienne nasadki
- Nie wymaga wody

NSK Satelec® MODEL **G22**

KOD **Z217020**

- 3 wymienne nasadki
- Nie wymaga wody



MODEL **Tip Cap**



MODEL **Tip Cap**

KOD **Y140751**

- Nasadki do G21 i G22
- Można sterylizować w autoklawie 
- Zestaw zawiera 10 sztuk.




MODEL **G26**

- Do usuwania wkładów (ø1,3 mm grubości)




MODEL **G28**

- Do kondensacji amalgamatu

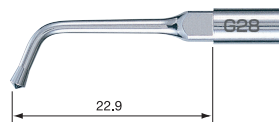

NSK Satelec® MODEL **G26**

KOD **Z217206**

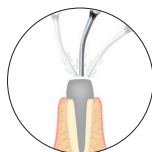

NSK Satelec® MODEL **G28**

KOD **Z217208**


- Nie wymaga wody



V-TIP (WIELOFUNKCYJNY SYSTEM WYMIENNYCH KOŃCÓWEK)


Odbudowa zęba

- Do zabiegów minimalnych
- Do zabiegów finalnych: wygładzanie, polerowanie
- Do usuwania próchnicy

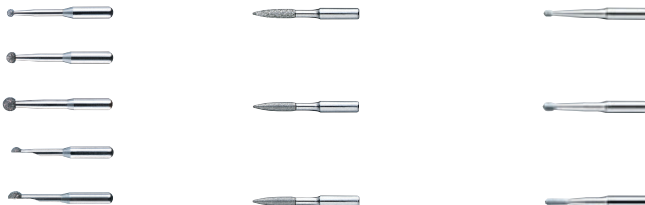

Endodoncja

- Do czyszczenia kanałów korzeniowych
- Do powiększania kanałów korzeniowych

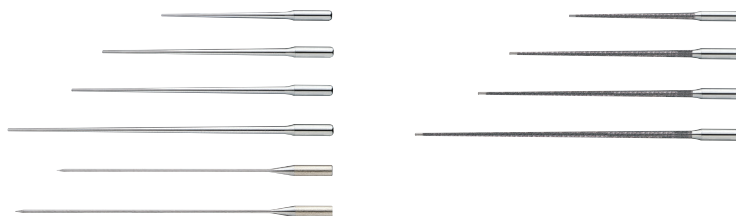

Kompatybilny z uchwytem V30, typoszereg wymiennych końcówek, przeznaczony do wykonywania zabiegów typu poszerzanie, kształtowanie i oczyszczanie kanałów korzeniowych, usuwanie próchnicy, złamanych pilników oraz lokalizacji ujść kanałów korzeniowych.

MODEL V30



KOD **Z217030**


- Uchwyt do końcówek
- Klucz do końcówek typu E (w zestawie)
- Końcówki opcjonalnie do wyboru



V30


- 120° kąt nachylenia

V-TIP (ENDODONCJA)

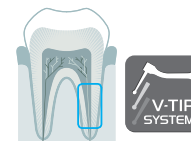

• Do czyszczenia kanałów korzeniowych

MODEL **V-S50**

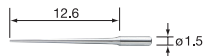

KOD **Y900169**

• Długość całkowita 17mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-S51**



KOD **Y900170**

• Długość całkowita 23mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-S52**

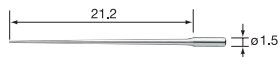

KOD **Y900171**


• Długość całkowita 26mm • W opakowaniu 3 szt.

MODEL **V-S53**

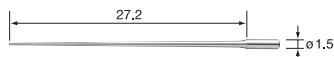


KOD **Y900172**

• Długość całkowita 32mm • W opakowaniu 3 szt.

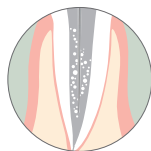


• Do czyszczenia kanałów

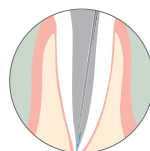

• Do usuwania złamanych pilników

• Do powiększania kanałów korzeniowych


MODEL **V-S50D**

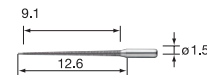

KOD **Y900173**

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 17mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-S51D**

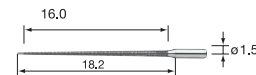

KOD **Y900174**

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 23mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-S52D**

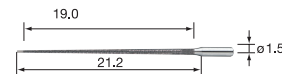

KOD **Y900175**

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 26mm • W opakowaniu 3 szt.

MODEL **V-S53D**

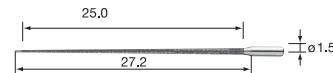

KOD **Y900176**

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 32mm • W opakowaniu 3 szt.




• Pokryte diamentem, z wyjątkiem odcinka 1mm na samym zakończeniu, redukuje to stopień podrażnienia kanału w jego dolnej części.

V-TIP (ODBUDOWA ZĘBA)

• Do zabiegów minimalnych

MODEL V-G70

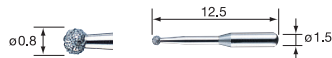

KOD Y900118

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 12,5mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-G71



KOD Y900119

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 12,5mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-G72

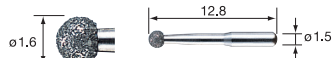

KOD Y900120

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 12,8mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-G75

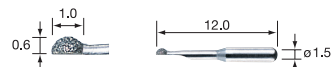

KOD Y900121

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 12,0mm • W opakowaniu 3 szt.

MODEL V-G76

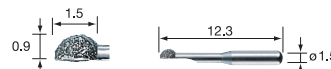

KOD Y900122

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 12,3mm • W opakowaniu 3 szt.

Zaletą cięcia za pomocą ultradźwięków jest minimalny ruch końcówki skalera, dzięki czemu usuwana jest tylko zębina z próchnicą, a zębina zdrowa pozostaje nietknięta. Krwawienie podczas leczenia ubytków przyszyjkowych jest bardzo minimalne, co przyspiesza gojenie.




• Do usuwania próchnicy



• Do usuwania próchnicy korzeniowej



• Do usuwania próchnicy i osadów międzypowierzchniowych

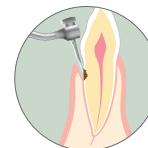


• Do usuwania próchnicy korzeniowej

V-TIP (ODBUDOWA ZĘBA)



- Do zabiegów finalnych: wygładzanie, polerowanie


MODEL **V-G77** Gradacja normalna

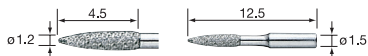

KOD **Y900165**

- Pokryte diamentem • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-G78** Gradacja drobna

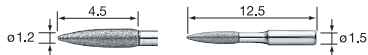

KOD **Y900166**

- Pokryte diamentem • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-G79** Gradacja bardzo drobna

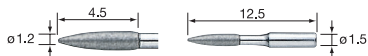

KOD **Y900167**

- Pokryte diamentem • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-S1**

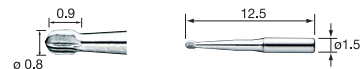

KOD **Y900161**

- Ze stali nierdzewnej • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-S3**

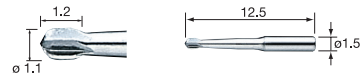

KOD **Y900162**

- Ze stali nierdzewnej • W opakowaniu 3 szt.

MODEL **V-S33**

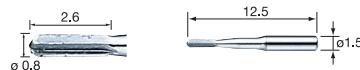


KOD **Y900163**

- Ze stali nierdzewnej • W opakowaniu 3 szt.



- Do powiększania kanałów korzeniowych

V-TIP (ODBUDOWA ZĘBA)

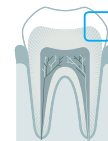

MODEL Assorted Tip Kit

- Do zabiegów o minimalnej interwencji



MODEL Assorted Tip Kit

- Do zabiegów finalnych: wygładzanie, polerowanie



MODEL Assorted Tip Kit

- Do usuwania próchnicy



MODEL Assorted Tip Kit

KOD **Y900158**

- Zestaw zawiera:
V-G70, V-G71, V-G72, V-G75, V-G78
po 1 szt. z każdego typu

MODEL Assorted Tip Kit

KOD **Y900168**

- Zestaw zawiera:
V-G77, V-G78, V-G79
po 1 szt. z każdego typu

MODEL Assorted Tip Kit

KOD **Y900164**

- Zestaw zawiera:
V-S1, V-S3, V-S33
po 1 szt. z każdego typu

Karta Kontrolna do pomiaru długości i stopnia zużycia końcówek.

JAK KORZYSTAĆ Z KARTY KONTROLNEJ

Jak sprawdzić stopień zużycia końcówek

1. Końcówkę przeznaczoną do pomiaru wsuń w odpowiednie nacięcie po prawej stronie karty.
2. Porównaj wynik stopnia zużycia końcówki, z podanym na karcie.
3. Po zapoznaniu się z nim postępuj zgodnie z podanymi niżej zaleceniami

Zielony. Końcówka jest odpowiedniej długości.

Wymiana nie jest konieczna.



Żółty. Końcówka na odcinku ~1 mm jest zużyta.

*Zalecana jest wymiana końcówki.





Czerwony. Końcówka na odcinku ± 2 mm jest bardzo zużyta.

Konieczna jest wymiana końcówki.



* Dla bezpieczeństwa i efektywności zabiegu NSK zaleca wymianę końcówki, gdy jej czubek został zużyty na odcinku ~1mm.

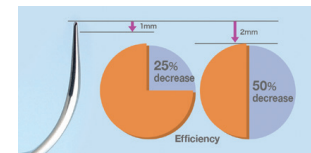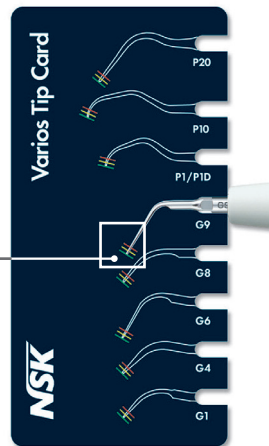

Klucz do wymiany końcówek ograniczający siłę (moc) skrętu.

Do końcówek: G1- G68D, G95, P1- P41 E15D, E30RD, E30LD, E31D, E32D i V-Tip

Uwaga! Należy wcisnąć końcówkę w otwór klucza aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia.



Klucz Typu E

Do końcówek: E4, E4D, E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11, E12 oraz uchwyty V30 (V-TIP)



makRomed



www.makromed.com.pl
infolinia **tel.42.678 88 54**
biuro@makromed.com.pl